

BACK-FIX

Korektor wad postawy



UŁOTKA DOŁĄCZONA DO PRODUKTU

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Korektor wad postawy Back-Fix pomaga utrzymać prawidłową postawę ciała oraz utrzymać proste plecy i ramiona poprzez trenowanie mięśni.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

– 1 x korektor wad postawy Back-Fix

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: neopren, skóra, tkanina

Rozmiar uniwersalny

Koryguje ułożenie górnej części kręgosłupa i ramion

Niewidoczny pod ubraniem: Jest zaprojektowany tak, żeby nie był widoczny pod ubraniem.

Regulowane zapięcie

Sposób użycia: Na początku nosić korektor przez 20–30 minut i powoli wydłużać czas noszenia o 10 minut, aż do godziny dziennie. Po kilku tygodniach postawa poprawi się, a wtedy wystarczy zakładać korektor od czasu do czasu.

PRAWIŁOWE ZAKŁADANIE



1 Maksymalnie poluzować paski na rzepy korektora wad postawy Back-Fix.

Założyć korektor tak, jak plecak.



2



3

Odpiąć paski na rzepy, a następnie pociągnąć za nie, aby korektor znalazł się w optymalnym położeniu.

Odpowiednio wyregulować paski na rzepy, aby je dopasować.



4

Uwaga!

Początkowo podczas noszenia korektora może występować uczucie dyskomfortu lub napięcie w okolicy pach, ponieważ mięśnie są w innym położeniu niż dotychczas. Dlatego na ten czas zalecamy noszenie korektora na koszulce, która zakrywa pachy. Użytkowanie korektora stanie się wygodniejsze z biegiem czasu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA: Stosować 20 do 60 minut dziennie

Korektor wad postawy ma za zadanie pomóc w utrzymaniu prostego kręgosłupa i złagodzić ból.

Może pojawić się ucisk w okolicy ramion podczas noszenia korektora, to normalne.

Przyzwyczajenie się do nowej, poprawnej postawy zajmuje 2–4 tygodnie.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Prać ręcznie w zimnej wodzie i suszyć na powietrzu. Nie czyścić chemicznie, nie prasować ani nie używać wybielacza.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec zagrożeniu środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.